

9.7 Mobilitetsprogram oppskrift

Mobilitetsprogram, oppskrift til masteroppgave «mobilitetsprogram i høreapparater for personer med kombinert syn og hørselsnedsettelse/døvblindhet».

Legger inn nytt program. Tar utgangspunkt i «stille» eller «universal» program.	
Phonak	Stille situasjon
Oticon	Generell
Widex	Stille
Signia	Universal (omni-mik ikke mulig i stillhet-program)
ReSound	Basis
Bernafon	Dynamisk
Starkey	Normal

- **Gjør ingen endringer i forsterkning – likt som i normalprogram.**
- **Slår av eventuell aktiv frekvenskomprimering.**
- **Lar feedbackansjering være på samme nivå som i normalprogram.**
- **Lar vindstøydemping være på samme nivå som i normalprogram.**

Setter til Omni-mikrofon		
Firma	Navn på funksjon	Justeres til
Phonak	Høreapparatmikrofon	Omnidireksjonal (0)
Oticon	Direksjonalitetsinnstilling Visuelt ytre øre	Fast omni Bevisst
Widex	Mikrofonsystem	Omni
Signia	Mikrofoninnstilling (slå av TruEar)	Omnidireksjonal
ReSound	Direksjonalitet	Omni
Bernafon	Smart retningsvisning Valg omni	Fast omni Omni
Starkey	Retningsvirkning	Omni

Slår av støydemping og talefokus, evt. også ekkodemping		
Firma	Navn på funksjon	Justeres til
Phonak	NoiseBlock	Av (0)
	Speech enhancer	Av (0)
Oticon	Neural Noise Suppression	Av
Widex	Brukerpreferanse	Mer hørbarhet (steg 4)
Signia	Tale- og støyhåndtering	Av
	Auto EchoShield	Av
ReSound	Noise Tracker II	Av
	Environmental Optimizer II	Av
Bernafon	Smart støyreduksjon	Av
	Hybrid balansering, støybalanse	Av
Starkey	Tale i sterk støy	Av
	Tale i støy	Av
	Maskin	Av
	Automatisk musikk	Av

Slår av impulsstøydemping		
Firma	Navn på funksjon	Justeres til
Phonak	Sound relax	Av (0)
Oticon	Sudden sound stabilizer	Av
Widex	Impluslyd demping	Av
Signia	SoundSmoothing	Av
ReSound	Impuls støydemping	Av
Bernafon	Reduksjon av impulsstøy	Av
Starkey	Situasjonsbestemt lydbehandling, impulsstøy	Av

Slår av demping av svake lyder		
Firma	Navn på funksjon	Justeres til
Phonak	Soft noise reduction	Av (0)
Oticon	Svake lyder	Midtstilt (samme som normalprogram)
Widex	Svak støydemping	Av
Signia	Støyreduksjon mikrofon	Av
ReSound	Ekspansjon	Av
Bernafon	Reduksjon av svak støy	Av
Starkey	Lydforbedring, stille	Av