

## Mobilitetsprogram oppskrift

Mobilitetsprogram, oppskrift til masteroppgave «mobilitetsprogram i høreapparater for personer med kombinert syn og hørselsnedsettelse/døvblindhet».

| <b>Legger inn nytt program. Tar utgangspunkt i «stille» eller «universal» program.</b> |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Phonak                                                                                 | Stille situasjon                                   |
| Oticon                                                                                 | Generell                                           |
| Widex                                                                                  | Stille                                             |
| Signia                                                                                 | Universal (omni-mik ikke mulig i stillhet-program) |
| ReSound                                                                                | Basis                                              |
| Bernaфон                                                                               | Dynamisk                                           |
| Starkey                                                                                | Normal                                             |

- **Gjør ingen endringer i forsterkning – likt som i normalprogram.**
- **Slår av eventuell aktiv frekvenskomprimering.**
- **Lar feedbackansjering være på samme nivå som i normalprogram.**
- **Lar vindstøydemping være på samme nivå som i normalprogram.**

| <b>Setter til Omni-mikrofon</b> |                                                 |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Firma</b>                    | <b>Navn på funksjon</b>                         | <b>Justeres til</b>  |
| Phonak                          | Høreapparatmikrofon                             | Omnidireksjonal (0)  |
| Oticon                          | Direksjonalitetsinnstilling<br>Visuelt ytre øre | Fast omni<br>Bevisst |
| Widex                           | Mikrofonsystem                                  | Omni                 |
| Signia                          | Mikrofoninnstilling (slå av TruEar)             | Omnidireksjonal      |
| ReSound                         | Direksjonalitet                                 | Omni                 |
| Bernaфон                        | Smart retningsvisning<br>Valg omni              | Fast omni<br>Omni    |
| Starkey                         | Retningsvirkning                                | Omni                 |

| <b>Slår av støydemping og talefokus, evt. også ekkodemping</b> |                                 |                        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>Firma</b>                                                   | <b>Navn på funksjon</b>         | <b>Justeres til</b>    |
| Phonak                                                         | NoiseBlock                      | Av (0)                 |
|                                                                | Speech enhancer                 | Av (0)                 |
| Oticon                                                         | Neural Noise Suppression        | Av                     |
| Widex                                                          | Brukerpreferanse                | Mer hørbarhet (steg 4) |
| Signia                                                         | Tale- og støyhåndtering         | Av                     |
|                                                                | Auto EchoShield                 | Av                     |
| ReSound                                                        | Noise Tracker II                | Av                     |
|                                                                | Environmental Optimizer II      | Av                     |
| Bernaфон                                                       | Smart støyreduksjon             | Av                     |
|                                                                | Hybrid balansering, støybalanse | Av                     |
| Starkey                                                        | Tale i sterk støy               | Av                     |
|                                                                | Tale i støy                     | Av                     |
|                                                                | Maskin                          | Av                     |
|                                                                | Automatisk musikk               | Av                     |

| <b>Slår av impulsstøydemping</b> |                                             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>Firma</b>                     | <b>Navn på funksjon</b>                     | <b>Justeres til</b> |
| Phonak                           | Sound relax                                 | Av (0)              |
| Oticon                           | Sudden sound stabilizer                     | Av                  |
| Widex                            | Impluslyd demping                           | Av                  |
| Signia                           | SoundSmoothing                              | Av                  |
| ReSound                          | Impuls støydemping                          | Av                  |
| Bernafon                         | Reduksjon av impulsstøy                     | Av                  |
| Starkey                          | Situasjonsbestemt lydbehandling, impulsstøy | Av                  |

| <b>Slår av demping av svake lyder</b> |                         |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Firma</b>                          | <b>Navn på funksjon</b> | <b>Justeres til</b>                 |
| Phonak                                | Soft noise reduction    | Av (0)                              |
| Oticon                                | Svake lyder             | Midtstilt (samme som normalprogram) |
| Widex                                 | Svak støydemping        | Av                                  |
| Signia                                | Støyreduksjon mikrofon  | Av                                  |
| ReSound                               | Ekspansjon              | Av                                  |
| Bernafon                              | Reduksjon av svak støy  | Av                                  |
| Starkey                               | Lydforbedring, stille   | Av                                  |

Spørsmål om mobilitetsprogram i høreapparater kan sendes til Anne May Førland på epost: [anne.may.forland@eikholt.no](mailto:anne.may.forland@eikholt.no)